



Inklusive  
Drehmoment-  
angaben

Übersicht

# BEGO SCHNITTSTELLEN

Stand  
August 2022

Miteinander zum Erfolg



# ECHT. GUT. INFORMIERT.

**Mit den BEGO eNews sind Sie auch in Sachen CAD / CAM-Implantatprothetik immer auf dem neuesten Stand!**

Melden Sie sich für den kostenlosen BEGO Newsletter an und erhalten Sie immer die aktuellste Übersicht der **BEGO Schnittstellen und Prothetik-Komponenten und CADPositioner**. Weiterhin informieren wir Sie stets über das aktuelle BEGO Produkt- und Serviceportfolio sowie über Fortbildungen, Messen und Veranstaltungen.

## **Interessiert?**

Dann abonnieren Sie unseren Newsletter unter:  
<https://www.bego.com/de/aktuelles/anmelden/>

Sie wollen direkt einen Blick auf die aktuellen Übersichten werfen?  
Dann scannen Sie einfach die unten stehenden QR-Codes mit Ihrem Smartphone ein.



Schnittstellenübersicht



Übersicht Prothetik-Komponenten  
und CADPositioner

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad\*- und 3Shape\*-Anwender verfügbar.

- 1) Nicht in exocad verfügbar.
- 2) Die dazugehörigen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- 3) In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.
- 4) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- 5) Neben dem graden Schraubenkanal ist **der abgewinkelte Schraubenkanal in 0° – 20°** auswählbar (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°).

NEU

**Schnittstellenübersicht**

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz	CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST Multi Katana Zirconia STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST Multi Katana Zirconia STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

**Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implantate Platform Match Design**

S 3,25	3,67	■					
S 3,75	3,67	■					
S 4,1	4,1	■	√ 5)		√	√ 5)	√
S 4,5	4,5	■					
S 5,5	5,5	■					

**Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini-Implantate (ausschließlich für Stege)**

2,7; 2,9; 3,1	3,5	■				√ 5)	
---------------	-----	---	--	--	--	------	--

**Serie 0.3 BEGO Implant Systems – Semados® Multi<sup>Plus</sup>**

3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5	Abutment Niveau						√
---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	---

**Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/S-TG/RS<sup>Pro</sup>/RSX<sup>Pro</sup>/RI-Implantate – Platform Switch Design**

RS/RSX 3,0	3,0	■					
SC/SCX 3,25	3,67	■					
SC/SCX/S-TG/RS <sup>Pro</sup> /RSX <sup>Pro</sup> /RI 3,75	3,67	■					
SC/SCX/S-TG/RS <sup>Pro</sup> /RSX <sup>Pro</sup> /RI 4,1	4,1	■	√ 5)	√	√	√ 5)	√
SC/SCX/RS <sup>Pro</sup> /RSX <sup>Pro</sup> /RI 4,5	4,5	■					
SC/SCX/RS <sup>Pro</sup> /RSX <sup>Pro</sup> /RI 5,5	5,5	■					

**Serie 1.1 kompatibel zu Straumann\* synOcta / Standard / Standard Plus / Tapered Effect (Variobase Abutment)**

3,3; 4,1; 4,8	RN 4,8	■ ■	√ 5)		√ 2)	√ 5)	√
6,5	WN 6,5	■					

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad\*- und 3Shape\*-Anwender verfügbar.

- 1) Nicht in exocad verfügbar.
- 2) Die dazugehörigen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- 3) In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.
- 4) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- 5) Neben dem graden Schraubenkanal ist **der abgewinkelte Schraubenkanal in 0° – 20°** auswählbar (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°).



**Schnittstellenübersicht**

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz	CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST Multi Katana Zirconia STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST Multi Katana Zirconia STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+

**Serie 1.2 kompatibel zu Straumann BoneLevel**

3,3	NC	■	√ 5)		√ 2)	√	√ 5)
4,1; 4,8	RC	■					

**Serie 1.4 kompatibel zu Straumann BLX**

3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,5	RB	■	√		√ 2)	√ 2)	√
5,0; 5,5; 6,5	WB	■					

**Serie 2.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants FRIALIT /XiVE**

3,4	3,4	■					
3,8	3,8	■	√		√		
4,5	4,5	■				√ 5)	
5,5	5,5	■					

**Serie 2.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants Ankylos (Ankylos CX Ti-Interface)**

3,5; 4,5; 5,5; 7,0	4,1				√ 2)		√
--------------------	-----	--	--	--	------	--	---

**Serie 3.1 kompatibel zu Nobel Biocare NobelActive**

3,5	NP	■	√		√	√	√
4,3; 5,0	RP	■					

**Serie 3.2 kompatibel zu Nobel Biocare NobelReplace /Replace Select /NobelSpeedy Replace**

3,5	NP	■					
4,0; 4,3	RP	■	√		√	√ 5)	
5,0	WP	■					
6,0	6,0	■					

**Serie 3.3 kompatibel zu Nobel Biocare Brånemark System /NobelSpeedy Shorty /Groovy**

3,3	NP	■				√	
3,75; 4,0	RP	■			√		√
5,0	WP	■					

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad\*- und 3Shape\*-Anwender verfügbar.

- 1) Nicht in exocad verfügbar.
- 2) Die dazugehörigen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- 3) In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.
- 4) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- 5) Neben dem graden Schraubenkanal ist **der abgewinkelte Schraubenkanal in 0° – 20°** auswählbar (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°).

NEU

**Schnittstellenübersicht**

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz	CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST Multi Katana Zirconia STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST Multi Katana Zirconia STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

**Serie 3.4 kompatibel zu Nobel Biocare Multi-unit Abutment**

Nobel Active	Abutment Niveau						✓
Nobel Replace							
Brånemark System							
Astra Tech OsseoSpeed							
Straumann synOcta							
Straumann BoneLevel							

**Serie 4.1 kompatibel zu BIOMET 3i Osseotite Certain/NanoTite Certain**

3,25; 3/4/3; 4/3	3,4	■					
4,0; 4/5/4; 5/4	4,1	■			✓		
5,0; 5/6/5; 6/5	5,0	■					
5,0; 5/6/5; 6/5	6,0	■					

**Serie 4.2 kompatibel zu BIOMET 3i Osseotite/NanoTite**

3,25	3,4	■					
3,75; 4,0; 3/4	4,1	■	✓		✓		✓
5,0; 4/5	5,0	■					

**Serie 5.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed**

3,5; 4,0	3,5/4,0	■					
4,5; 5,0	3,5/5,0	■	✓		✓		✓

**Serie 5.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV**

3,0	3,0	■					
3,6	3,6	■					
4,2	4,2	■	✓		✓ 4)	✓	✓
4,8	4,8	■					
5,4	5,4	■					

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad\*- und 3Shape\*-Anwender verfügbar.

- 1) Nicht in exocad verfügbar.
- 2) Die dazugehörigen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- 3) In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.
- 4) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- 5) Neben dem graden Schraubenkanal ist **der abgewinkelte Schraubenkanal in 0° – 20°** auswählbar (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°).



**Schnittstellenübersicht**

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz	CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST Multi Katana Zirconia STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST Multi Katana Zirconia STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+
<b>Serie 6.1 kompatibel zu Zimmer Dental Tapered Screw-Vent</b>							
3,7; 4,1	3,5	■				✓	
4,7	4,5	■		✓	✓		
6,0	5,7	■					
<b>Serie 8.1 kompatibel zu CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE/ROOT-LINE</b>							
3,3	3,3	■					
3,8	3,8	■	✓ 5)				
4,3	4,3	■		✓ 3)	✓	✓ 5)	✓
5,0	5,0	■	✓				
6,0	6,0	■					
<b>Serie 8.2 kompatibel zu CAMLOG CONELOG SCREW-LINE</b>							
3,3	3,3	■					
3,8	3,8	■					
4,3	4,3	■		✓ 3)	✓		
5,0	5,0	■					
<b>Serie 8.3 kompatibel zu CAMLOG iSy (iSy Hybrid Abutment)</b>							
4,4; 5,0	4,5/5,2	■			✓ 1) & 2)		
<b>Serie 9.1 kompatibel zu Dyna Dental Dyna Helix</b>							
3,2; 3,6; 4,2; 5,0	3,6/4,0	■				✓	
<b>Serie 10.1 kompatibel zu BioComp Implant Level/Abutment Level</b>							
3,4; 4,0	4,0					✓	✓
4,6; 5,2	5,2						
<b>Serie 11.1 kompatibel zu Neoss ProActive</b>							
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	4,0	■	✓	✓		✓	

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad\*- und 3Shape\*-Anwender verfügbar.

- 1) Nicht in exocad verfügbar.
- 2) Die dazugehörigen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- 3) In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.
- 4) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- 5) Neben dem graden Schraubenkanal ist **der abgewinkelte Schraubenkanal in 0° – 20°** auswählbar (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°).

NEU

**Schnittstellenübersicht**

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz	CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST Multi Katana Zirconia STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST Multi Katana Zirconia STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

**Serie 13.1 kompatibel zu BioHorizons Internal**

3,0	3,0	■					
3,5	3,5	■					
4,5	4,5	■			✓		
5,7	5,7	■					

**Serie 15.1 kompatibel zu Bredent medical Sky**

3,5	3,5	■					
4,0; 4,5; 5,5	4,0	■ ■ ■			✓		

**Serie 16.1 kompatibel zu Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium**

3,75; 4,1; 4,8	4,0	■	✓		✓		✓
----------------	-----	---	---	--	---	--	---

**Serie 17.1 kompatibel zu Global D In-Kone**

4,3	4,3						✓ 2)
-----	-----	--	--	--	--	--	------

**Serie 17.2 kompatibel zu Global D EVL**

3,3; 4,0; 5,0	3,3/4,0/ 5,0	■ ■ ■					✓ 2)
---------------	-----------------	-------	--	--	--	--	------

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

## Anzugsdrehmoment Prothetikschaube\*

Implantatdurchmesser	Gerader Schraubenkanal (0°) einteilig	Gerader Schraubenkanal (0°) zweiteilig (Klebebasis)	Abgewinkelter Schraubenkanal (0°–20°)
<b>Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implantate Platform Match Design</b>			
S3,25/S3,75/S4,1/S4,5/S5,5	30 Ncm	30 Ncm	25 Ncm
<b>Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini-Implantate</b>			
2,7/2,9/3,1	25 Ncm	–	20 Ncm
<b>Serie 0.3 BEGO Implant Systems – Semados® Multi<sup>Plus</sup></b>			
Abutment Niveau (Multi <sup>Plus</sup> )	20 Ncm	–	–
<b>Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/S-TG/RS<sup>Pro</sup>/RSX<sup>Pro</sup>/RI-Implantate – Platform Switch Design</b>			
RS/RSX 3,0	20 Ncm	20 Ncm	15 Ncm
SC/SCX 3,25	30 Ncm	30 Ncm	25 Ncm
SC/SCX/S-TG/RS <sup>Pro</sup> /RSX <sup>Pro</sup> /RI 3,75/4,1/4,5/5,5	30 Ncm	30 Ncm	25 Ncm
<b>Serie 1.1 kompatibel zu Straumann synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect (Variobase Abutment)</b>			
3,3; 4,1; 4,8; 6,5	35 Ncm	35 Ncm	25 Ncm
Abutment Niveau 3,3; 4,1 RN; 4,8	15 Ncm	15 Ncm	–
<b>Serie 1.2 kompatibel zu Straumann BoneLevel</b>			
3,3; 4,1; 4,8	35 Ncm	35 Ncm	20 Ncm
<b>Serie 1.4 kompatibel zu Straumann BLX</b>			
3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,5; 6,5	35 Ncm	35 Ncm	–
<b>Serie 2.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants FRIALIT/XIVE</b>			
3,4; 3,8; 4,5; 5,5	24/25 Ncm	24/25 Ncm	20 Ncm
<b>Serie 2.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants Ankylos (Ankylos CX Ti-Interface)</b>			
Abutment Niveau 3,5; 4,5; 5,5; 7,0	10 Ncm	10 Ncm	–
<b>Serie 3.1 kompatibel zu Nobel Biocare NobelActive</b>			
3,5; 4,3; 5,0	25/35 Ncm	25/35 Ncm	–
<b>Serie 3.2 kompatibel zu Nobel Biocare NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace</b>			
3,5; 4,0; 4,3; 5,0; 6,0	35 Ncm	35 Ncm	25 Ncm
<b>Serie 3.3 kompatibel zu Nobel Biocare Branemark System/Nobel Speedy Shorty/Groovy</b>			
3,3; 3,75; 4,0; 5,0	–	35 Ncm	–
<b>Serie 3.4 kompatibel zu Nobel Biocare Multi-unit Abutment</b>			
Abutment Niveau	15 Ncm	15 Ncm	–
<b>Serie 4.1 kompatibel zu BIOMET 3i Osseotite Certain/NanoTite Certain</b>			
3,25; 3/4/3; 4/3; 4,0 4/5/4; 5/4; 5,0; 5/6/5; 6/5; 5,0; 5/6/5; 6/5	–	20 Ncm	–
<b>Serie 4.2 kompatibel zu BIOMET 3i Osseotite/NanoTite</b>			
3,25; 3,75; 4,0; 3/4; 5,0; 4/5	20 Ncm	35 Ncm	–
<b>Serie 5.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed</b>			
3,5; 4,0	20 Ncm	25 Ncm	–
3,5; 5,0	25 Ncm	25 Ncm	–

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

## Anzugsdrehmoment Prothetikschaube\*

Implantatdurchmesser	Gerader Schraubenkanal (0°) einteilig	Gerader Schraubenkanal (0°) zweiteilig (Klebebasis)	Abgewinkelter Schraubenkanal (0°–20°)
<b>Serie 5.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV</b>			
3,0; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4	25 Ncm	25 Ncm	–
Abutment Niveau	15 Ncm	15 Ncm	–
<b>Serie 6.1 kompatibel zu Zimmer Dental Tapered Screw-Vent</b>			
3,7; 4,1; 4,7; 6,0	30 Ncm	30 Ncm	–
<b>Serie 8.1 kompatibel zu CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE/PROGRESSIVE-LINE/ROOT-LINE</b>			
3,3; 3,8; 4,3	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
5,0; 6,0	20 Ncm	20 Ncm	25 Ncm
Abutment Niveau	15 Ncm	–	–
<b>Serie 8.2 kompatibel zu CAMLOG CONELOG SCREW-LINE</b>			
3,3; 3,8; 4,3; 5,0	20 Ncm	20 Ncm	–
<b>Serie 9.1 kompatibel zu Dyna Dental Dyna Helix</b>			
3,2; 3,6; 4,2; 5,0	35 Ncm	–	–
<b>Serie 10.1 kompatibel zu BioComp Implant Level/Abutment Level</b>			
3,4; 4,0; 4,6; 5,2	32 Ncm	–	–
Abutment Niveau 3,4; 4,0; 4,6; 5,2	20–25 Ncm	–	–
<b>Serie 11.1 kompatibel zu Neoss ProActive</b>			
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	32 Ncm	30 Ncm	–
<b>Serie 13.1 kompatibel zu BioHorizons Internal</b>			
3,0; 3,5; 4,5; 5,7	–	30 Ncm	30 Ncm
<b>Serie 15.1 kompatibel zu Bredent medical Sky</b>			
3,5; 4,0; 4,5; 5,5	–	25 Ncm	–
<b>Serie 16.1 kompatibel zu Medentis ICX-Active-Master/ICX Premium</b>			
3,75; 4,1; 4,8	30 Ncm	30 Ncm	–
<b>Individuelle Abheilpfosten</b>			
BEGO CADAbut Full, BEGO CADAbut Duo	15 Ncm	–	–

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.



# BEGO SECURITY Prosthetics

## Die kostenfreie Garantieleistung

### BEGO SECURITY Prosthetics – Unsere kostenfreie Garantieleistung für Sie

BEGO SECURITY Prosthetics beinhaltet die kostenfreie und unkomplizierte Ersatzlieferung von BEGO Produkten im Falle einer nachweisbaren Beanstandung. Für jede Versorgungsart der CAD/CAM-Implantatprothetik bieten wir Ihnen passende BEGO SECURITY Prosthetics Lösungen und gehen mit unserer freiwilligen Leistung über die gesetzliche Gewährleistung hinaus – je nach Versorgungsart sogar bis zur lebenslangen Garantie.

#### „CAD/CAM-Implantatprothetik“

Versorgungsart	Material		Dauer	Leistung
Abutments	Metall	gilt für einteilige Abutments aus BEGO Titan Grade 5 sowie Wirobond® MI+ und M+	lebenslang	kostenfreier Ersatz des Abutments, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu € 1.200,-, ggf. Materialkosten des Implantats
	Zirkon	gilt für von BEGO CAD/CAM-gefertigte individuelle Implantatprothetik	5 Jahre	kostenfreier Ersatz des Abutments, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu € 1.200,-, ggf. Materialkosten des Implantats
Stege	Metall	gilt für Stege aus BEGO Titan Grade 5 sowie Wirobond® MI+ und M+	lebenslang	kostenfreier Ersatz der Stege, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu € 1.200,-, ggf. Materialkosten des Implantats
Brücken	Metall	gilt für von BEGO CAD/CAM-gefertigte individuelle verschraubbare Brücken	lebenslang	kostenfreier Ersatz der Brücken, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu € 1.200,-, ggf. Materialkosten des Implantats

Bei Fragen zur Abwicklung und/oder unseren kostenfreien BEGO SECURITY Prosthetics Lösungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

#### Für weitere Fragen zur BEGO SECURITY Prosthetics

Thomas Mantwill	Telefon	+49 421 2028-284
	E-Mail	mantwill@bego.com



**Kennen Sie schon BEGO SECURITY Implants?**

Mehr Infos unter:





# Die BEGO Garantieleistung

für Ihre CAD/CAM-Implantatprothetik  
„Made in Germany“

BEGO gewährt eine lebenslange Garantie auf alle einteiligen individuellen BEGO Titan sowie Wirobond® Abutments – unabhängig vom gewählten Implantatsystem. Bei Zirkon-Abutments beträgt die Garantiezeit 5 Jahre.

Die BEGO Garantie, gilt ab dem Zeitpunkt der Belieferung und umfasst die kostenfreie Ersatzlieferung von BEGO CAD/CAM-Produkten für individuelle Implantatprothetik sowie die Kostenübernahme für die notwendige Entfernung von Schraubenresten im Falle einer Prothetik-Schraubenfraktur gemäß der BEGO Garantiebedingungen.

Verweigert der Implantat-Lieferant im Falle eines Implantatverlustes, der sich auf die von BEGO gelieferte individuelle prothetische Komponente zurückführen lässt, einen Ersatz oder eine Kostenerstattung, weil ein CAD/CAM-gefertigtes BEGO Produkt verwendet wurde, übernimmt BEGO (sofern dies aus zahnmedizinischen Gründen notwendig ist) die Materialkosten für ein Ersatzimplantat.

Details und weitere Garantieleistungen finden Sie in unseren Garantiebedingungen „BEGO SECURITY Prosthetics“, auf die wir ausdrücklich verweisen.

BEGO Medical führt den Nachweis über die Einführung und Anwendung des Qualitätsmanagementsystems für Medizinprodukte nach EN ISO 13485 und ISO 9001.

Thomas Mantwill  
Produktmanager  
BEGO SECURITY Prosthetics





[www.bego.com](http://www.bego.com)

**BEGO Scan- und Designcenter Nord**

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany  
Tel. +49 421 2028-200

**BEGO Medical GmbH**

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany  
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100  
E-Mail [info@bego-medical.com](mailto:info@bego-medical.com) · [www.bego.com](http://www.bego.com)

**Immer alle BEGO News im Blick haben?**

Hier direkt zum Newsletter anmelden: [www.bego.com/newsletter](http://www.bego.com/newsletter)



Bitte beachten Sie, dass je nach behördlicher Zulassung nicht alle unsere Produkte und Dienstleistungen in jedem Land verfügbar sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen BEGO Repräsentanten.  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Grundlage unserer Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (AGB), welche jederzeit auf [www.bego.com](http://www.bego.com) abrufbar sind und auf Wunsch gerne übersandt werden.